

EKSTRAKTOR WKŁADKI WEWNĄTRZMACICZNEJ (IUD)

Instrukcja użycia

Przed skorzystaniem z przyrządu konieczne zlokalizuj położenie wkładki, która ma być wyjęta, za pomocą skanera ultradźwiękowego, w jamie macicy.

Dokładnie sprawdź pochwę.

Dokładnie zdezynfekuj szyjkę macicy.

- a) Dokonaj pomiaru macicy za pomocą odpowiedniego prostego zgłębnika do mierzenia macicy lub zakrzywionego zgłębnika w przypadku tyłozgięcia lub przodozgięcia macicy (w takim przypadku konieczne może być zastosowanie kleszczy w szyjce).
- b) Ostrożnie wprowadź ekstraktor wkładki aż do wyznaczonej głębokości lekko naciskając w celu obrócenia zgodnie z ruchem wskazówek: ten ruch ułatwi wprowadzenie i pomoże uniknąć urazów tkanki.
- c) Po dotarciu do dna macicy wykonaj jeszcze jeden ruch, tym razem przeciwnie do ruchu wskazówek: ten ruch ułatwi zaczepienie wkładki.
- d) Ostrożnie wyciągnij przyrząd aż, będąc blisko zewnętrznego ujścia macicy, pojawi się drucik znacznika lub część sztywnej struktury wkładki.
- e) Przestań ciągnąć ekstraktor.
- f) Użyj kleszczy odpowiednich do zaczepienia drucika lub segmentu wkładki i w ten sposób dokończ wyjmowanie wkładki.

Uwaga: Przeczytaj instrukcje przed użyciem. Nie używaj powtórnie. Użyj tylko, jeśli opakowanie jest nieuszkodzone. Użyj natychmiast po otwarciu. Do użytku wyłącznie przez przeszkolony personel medyczny.

Nie używaj tego przyrządu w przypadku: wcześniejszego zabiegu wycięcia mięśniaka lub wielokrotnego nacięcia macicy, znacznego przodozgięcia lub tyłozgięcia macicy, aktualnego zapalenia.